

Mode d'emploi

Loupe électronique à LED piggy® MAG16



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service du système !

Remarque :

Veillez nous contacter si des accessoires manquent. La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les noms de produits, de services, etc. mentionnés dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des entreprises concernées.



Avertissement:

- * Conserver hors de portée des enfants.
- * N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit ou ses accessoires dans des environnements chauds, tels que dans une voiture, près d'un radiateur ou d'un appareil de cuisson, ou à la lumière directe du soleil.
- * Ne l'utilisez pas dans des endroits poussiéreux.
- * Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- * N'utilisez pas de diluant ni d'autres solvants organiques pour nettoyer du produit.
- * Veillez à ce que l'appareil soit bien stable.





Remarque:

Les schémas utilisés dans ce manuel sont fournis à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

Precautions

1. Utiliser uniquement dans des environnements dont la température est comprise entre -15 °C et 55 °C.
2. Évitez tout contact avec des liquides.
3. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, de flammes nues, de gaz ou de liquides inflammables ou explosifs.
4. Éloignez la poussière de l'écran et de l'intérieur du produit.
5. Évitez les chocs et les vibrations importantes.

Description du produit

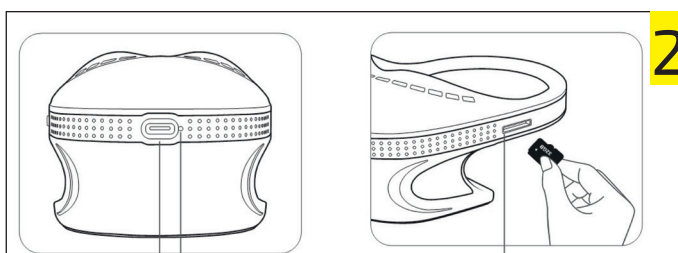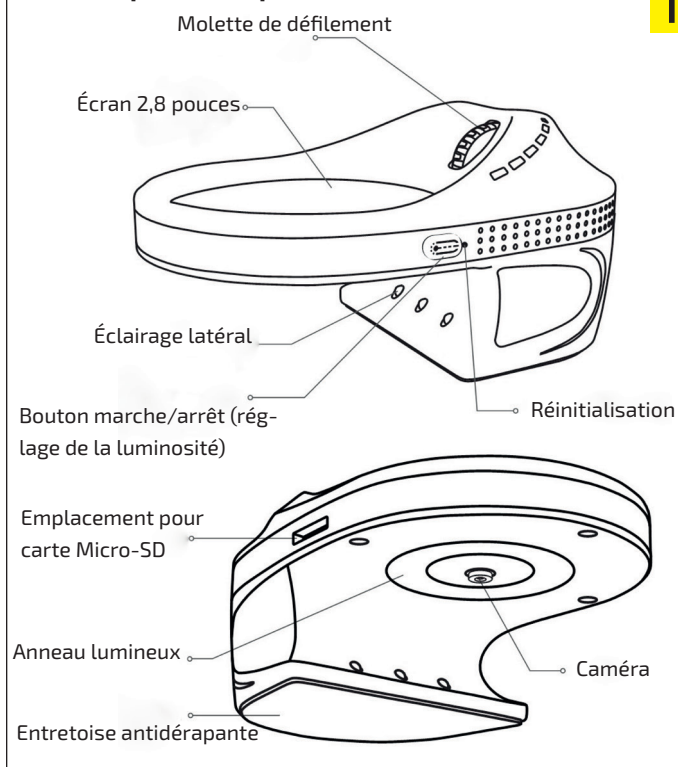

USB-C Port USB-C recharge et connexion à un grand écran.

Voyant lumineux Lumière rouge : Chargement en cours
Lumière verte : Chargement terminé

Emplacement pour carte micro SD, cartes mémoire prises en charge jusqu'à 64 Go



Entièrement compatible avec plusieurs appareils, prend en charge les chargeurs, les batteries externes et les ordinateurs pour recharger les aides visuelles.




Veillez ne pas laisser le microscope en charge plus de 12 heures afin de ne pas nuire à la durée de vie de la batterie.



Remarque : pendant le chargement, il est normal que le boîtier extérieur du microscope chauffe légèrement.

1. Le microscope s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.
2. Si l'appareil se bloque, utilisez un outil d'éjection de carte SIM pour le redémarrer. Le bouton de réinitialisation se trouve à droite du bouton marche/arrêt.

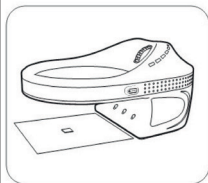


1. Veuillez placer la loupe sur une support sur une surface stable, appuyez sur le bouton d'allumage situé sur le côté pour la mettre en marche, puis placez l'objet à observer directement sous l'objectif.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant environ 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

Cet appareil est équipé d'une mise au point fixe et ne nécessite pas de réglage répété, ce qui le rend facile à utiliser.

Nettoyage:

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement l'écran et le boîtier afin que l'appareil reste propre et fonctionne correctement. Si l'écran est sale, essuyez-le délicatement avec un chiffon doux.

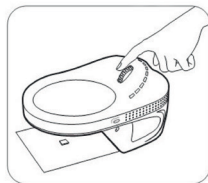

2. Vous pouvez sélectionner le grossissement sur 4 niveaux en tournant la molette de défilement. (1X - 2X - 3X - 4X)*

Rotation vers le haut :
Zoom avant
Rotation vers le bas :
Zoom arrière

Appuyez sur la molette de défilement pour les photos, maintenez-la enfoncée pour les vidéos.

* correspond à un grossissement de 8x, 11x, 13x ou 16x



3. Vous pouvez basculer entre les modes d'éclairage en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt :

- lumière blanche
- lumière UV
- lumière blanche latérale
- sans lumière


L'intensité lumineuse se règle en maintenant enfoncé l'interrupteur marche/arrêt, quel que soit le mode d'éclairage. Pour éteindre la loupe LED, sélectionnez le mode « sans lumière », puis maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt.

3

Connexion PC

4

1. Utilisez le câble de chargement fourni. Branchez le connecteur USB-C sur l'appareil et le connecteur USB-A sur l'ordinateur.

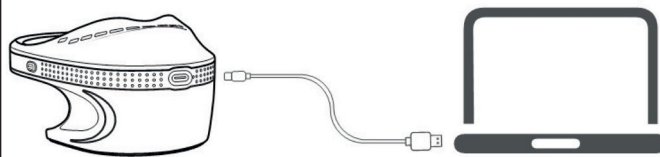

2. Une fois la connexion établie, un menu s'affiche sur l'écran de la loupe. Sélectionnez « Mass Storage » et confirmez votre choix en appuyant à nouveau sur la molette de défilement. La loupe s'affiche alors comme un périphérique de stockage sur l'ordinateur connecté

3. Si vous sélectionnez « PC-Kamera » dans le menu et que vous confirmez, vous pouvez transférer l'image de la caméra directement sur l'écran. Nous vous recommandons d'utiliser l'application Appareil photo de Windows. La loupe fonctionne comme une caméra USB externe.

En mode caméra PC, les boutons situés sur la loupe sont désactivés. Dans ce mode, l'appareil doit être commandé via l'ordinateur.



Mode photos

5

Cliquez sur la molette de défilement l'image est figée.

Cliquez à nouveau sur la molette de défilement : l'écran se déverrouille et, dans le même temps, la photo est automatiquement enregistrée sur la carte micro SD.



Mode vidéo


Appuyez longuement sur la molette de défilement pour passer en mode vidéo. Un point rouge clignote à l'écran, indiquant que la vidéo est en cours d'enregistrement et la carte micro SD.

Utilisation


6

Remarque :

Avant d'utiliser la loupe, veuillez insérer la carte micro SD afin de garantir l'enregistrement des photos et des fichiers vidéo. (Prend en charge les cartes microSD d'une capacité maximale de 64 Go)

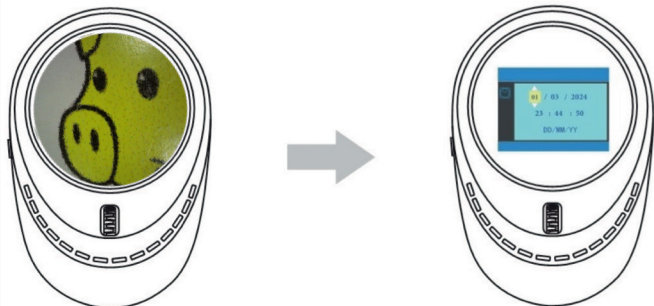

Lorsque l'écran avec le logo apparaît, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode de réglage de la date, puis utilisez la molette de défilement pour modifier la date.

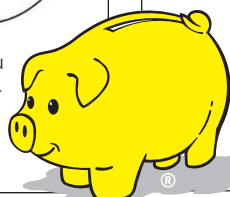

Caractéristiques

7

Écran	Super TFT
Boîtier	Renforcé en ABS
Dimensions	130 x 87 x 64 mm
Grossissement	8x - 11x - 13x - 16x
Ø de l'écran	2,8 pouces (70 mm)
Appareil photo	1 MP (HD 1.280 x 720)
Appareil photo	3,5 h en éclairage continu, 2,5 h de charge
Source lumineuse	7 LED blanches / 4 LED UV
Entrée	USB-C / DC5V <2A
Poids	Env. 160 g

Die mit dem Sparschwein